

SCORE 2.0 update februari 2021

SCORE

In samenwerking met



SCORE 2.0. behoudt alle sterktes van SCORE 1.76

Het is en blijft een robuust taalsysteem met:

- een doordachte selectie van kernwoordenschat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
- een uitgebreide waaier randwoorden
- een consistente organisatie:
 - om het motorisch leren te ondersteunen
 - om zinsontwikkeling te stimuleren
 - om woordenschat logisch te kunnen uitbreiden en personaliseren
- heel wat mogelijkheden om woorden te vervoegen en verbuigen. Dit faciliteert het modelleren en vormen van correcte zinnen.
- met diverse letterkaarten, waarbij je fonetische verklanking en woordvoorspelling als ondersteuning kan inzetten.
- media en extra's zoals de mogelijkheid om boodschappen op te slaan en/of te printen, eigen muziek of radio te luisteren, YouTube-filmpjes op te zoeken en te bekijken, gedownloade filmpjes te kijken, foto's te nemen en bekijken, te dubbelen, mails en/of sms'jes te verzenden en bewerkingen te maken op je rekenmachine.

SCORE 2.0. is tot stand gekomen voor en door onze SCORE-gebruikers

We gingen aan de slag met de feedback uit gebruikerservaringen. Hieronder vind je een bondig overzicht van de verschillende nieuwigheden:


- Belangrijk is de uitbreiding van de woordenschat. Hierbij werd rekening gehouden met frequentielijsten, woordenschat uit het Nederlandstalig schoolcurriculum (aansluiting bij leerlijnen) en uit de leefwereld van onze opgroeiende doelgroepen.
- De organisatie van de woordenschat werd opnieuw geëvalueerd. Woorden en frases zijn ondergebracht in bestaande of nieuwe subcategorieën.
- Ruimte voor een weekplanning
- lay-out : 4-traps (500, 2000, uitgebreid, volledig)
- mogelijkheid om middenvak te vergroten
- info om je SCORE uit te breiden
- duidelijke visualisatie van lege kant-en-klare pagina's
- ruimte voor Visual Scene Display
- nieuwe visualisaties
- pre-grammaticale acties
- meer grammaticale acties, namelijk verkleinvormen
- meer tussenvoegsels
- speciale tekens in de reguliere letterkaart
- de mogelijkheid om eenvoudiger een hoofdletter te gebruiken bij de aanzet van je woord of zin
- een geïntegreerde zoekfunctie om snel een woord terug te vinden in je taalsysteem
- alternatieve woordvoorspelling
- meer kant-en-klare ruimte voor eigen woordenschat
- nieuwe radiostations
- muziek, video's en foto's in dynamische lijsten.
- vernieuwde stijlen (rechte hoeken)
- geluidseffecten in de categorie "dieren/natuur"
- de mogelijkheid om vlotter eigen fotoboekjes toe te voegen


SCORE en Mind Express 5

Mind Express 5 heeft ook heel wat interessante functionaliteiten die een meerwaarde kunnen betekenen voor SCORE:

- Labels volgen de vervoeging of verbuiging van het woord:
 - Reden: visualisatie van de grammatica
 - Werkwijze:
 1. ME5 > Menu > Instellingen > Document > Labels veranderen volgens grammatica:
 2. Opgelet: opslaan (?)
- Zoekfuncties
 - Reden:
 1. De SCORE-woordenschat leren kennen
 2. Tijdens modelleren doelwoord eenvoudig opzoeken
 3. Wil je SCORE personaliseren? Ga eerst even na of het woord nog niet in SCORE staat
- [Pagina's importeren en exporteren](#)
 - Reden: Heb je eigen pagina's gemaakt in SCORE 1.76, maar wil je nu werken met SCORE 2.0? Importeer je eigen pagina's in SCORE 2.0.:
- Bediening: scangroepen en prescan in blokken

De vernieuwingen in SCORE 2.0

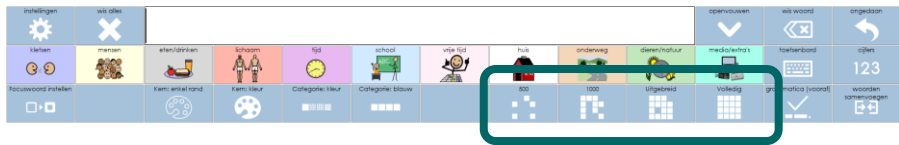Nieuw	Meer info
<p>1. Uitbreiding en herorganisatie woordenschat:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Andere kernwoordenschat op startpagina: vanuit ervaringen in de dagelijkse praktijk (practice based) zijn kernwoorden toegevoegd aan de evidence based woordenlijst. o Meer subcategorieën: alle categorieën zijn flink uitgebreid met subcategorieën zoals de feestdagen, buiten spelen, geld en dieren. o Grotere woordenschat: deze is met circa 1000 nieuwe symbolen stevig uitgebreid. o Meer 'kant-en-klare' zinnen (formulaic language): in Score v2 vind je nu veel zinnen om snel in contact te komen, snel hulp te vragen of snel iets te regelen. Ook in de subcategorieën zijn meer 'kant-en-klare' zinnen te vinden. 	

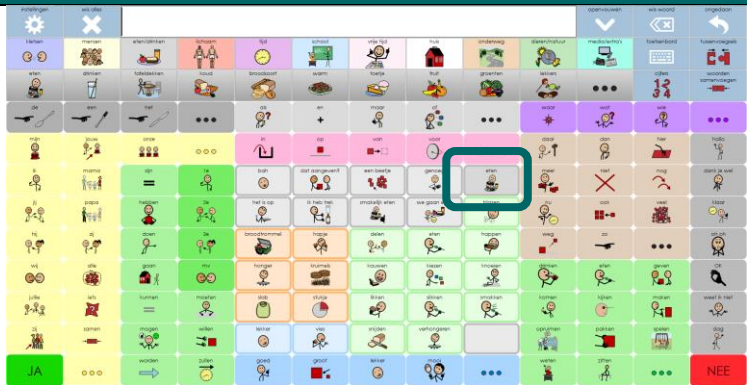Nieuw	Meer info
<p>2. Mogelijkheid om middenvak te vergroten</p> <ul style="list-style-type: none"> o Reden: <ul style="list-style-type: none"> i. vereenvoudigen weergave (bv. in kader van visus en verwerking ...) ii. eenvoudig exploreren randwoordenschat in dynamisch middenblok o Werkwijze: <ul style="list-style-type: none"> i. In het dynamisch middenblok staat rechtsboven een vakje dat de subcategorie visualiseert. ii. Selecteer dit vakje. iii. Het dynamisch middelblok neemt nu het volledige scherm in. iv. Wil je terugkeren naar de vorige weergave? Selecteer opnieuw het vakje dat de subcategorie visualiseert. 	

Nieuw

3. Info om je SCORE uit te breiden

- o Reden:
 - i. Eigen woorden, frases en zinnen toevoegen volgens de SCORE-principes
 - ii. Hulp om de juiste stijl en acties te gebruiken
- o Werkwijze:
 - i.** Ga naar "Kletsen"
 - ii.** Selecteer de drie zwarte stippen "... " in de dynamische keuzelijst
 - iii.** Ga vervolgens naar "een nieuw plaatje"
 - iv.** Volg de instructies op deze pagina

Meer info



Nieuw

4. Makkelijker personaliseren.

- o Om snel Score aan te passen aan de gebruiker zijn er een aantal bladen die je meteen persoonlijk kan maken. Voorbeelden zijn:
 - i. de foto's bij personen zoals "gezin/familie", "school", "therapeuten" en "vrienden"
 - ii. een blad 'over mij' waarin je de hobby's, lievelingseten etc. kan invullen
 - iii. favoriete tv programma's en tv figuren.
- o Werkwijze:
 - i. Ga naar één van bovenstaande voorbeeldpagina's (bv. "kletsen" > "over mij" (via de drie zwarte puntjes)
 - ii. Ga naar "Bewerken"
 - iii. Dubbelklik op het dynamisch blok. Zo wordt je automatisch naar de doelpagina gebracht, die je wil bewerken.
 - iv. Pas figuur, label en tekstactie aan.
 - v. Ga terug naar pagina 1.
 - vi. Kies je gewenste bedieningsmethode.

Meer info



Nieuw

5. Duidelijke visualisatie van lege kant-en-klare pagina's
- o Reden:
verduidelijken waar je eigen subcategorieën, woorden, frases en zinnen vlot kan toevoegen

Meer info

The screenshot shows a communication board interface with a grid of 10x10 empty, ready-to-use pages. A blue box highlights a specific page in the top row, and a larger blue box highlights the entire grid area. The interface includes a top navigation bar with various icons and a bottom bar with 'JA' and 'NEE' buttons.

Nieuw

6. Pagina voor Visual Scene Display
- o Reden:
Ruimte bieden om een contextuele communicatiekaart te maken rond een bepaald onderwerp.
 - o Werkwijze:
 - Ga naar "media/extra's"
 - Ga vervolgens naar "VSD"
 - Volg de instructies op deze pagina


Meer info

The screenshot shows a communication board interface with a page for Visual Scene Display (VSD). A blue box highlights a specific page in the top row, and a larger blue box highlights the VSD page area. The VSD page features a photo of a person and a text area. The interface includes a top navigation bar with various icons and a bottom bar with 'JA' and 'NEE' buttons.

Nieuw

7. Nieuwe visualisaties voor bepaalde functies
- o Reden: visuele rust en consistentie

Meer info

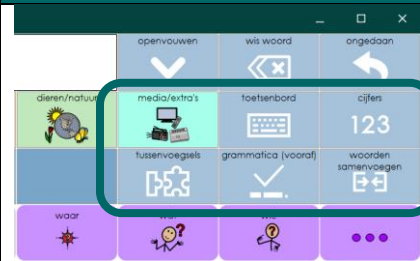

Nieuw

8. Pre-grammatica

- o De mogelijkheden qua grammatica zijn nog steeds beschikbaar in SCORE v2.

Concreet: na het aanklikken van een woord,



- i. kan je in de dynamische keuzelijst een vervoeging of verbuiging toepassen.
- ii. Kan je op pagina 1 de persoon aanpassen

- o In SCORE v2.. kan je echter ook vooraf een vervoeging of verbuiging opgeven.

- o Reden:

- i. Zo is het mogelijk om proactief de juiste vorm te bouwen. Zo krijg je meteen de juiste vorm, zonder eerst de basisvorm te horen.

- o Werkwijze

- i. Wil je ook pre-grammatica kunnen toepassen in SCORE? Zet de 'grammatica (vooraf)'-knop aan in je SCORE

1. Ga naar "instellingen"
2. Selecteer "grammatica (vooraf)"
3. Bevestig je keuze door "ja" te klikken.



- ii. Selecteer "grammatica (vooraf)"

- iii. Selecteer de gewenste vorm van het werkwoord

- iv. Of selecteer de drie zwarte stippen, als je een zelfstandig naamwoord wil verbuigen

je kan het vakje "grammatica (vooraf)" onzichtbaar maken

Meer info

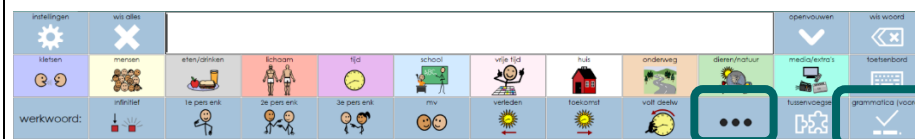
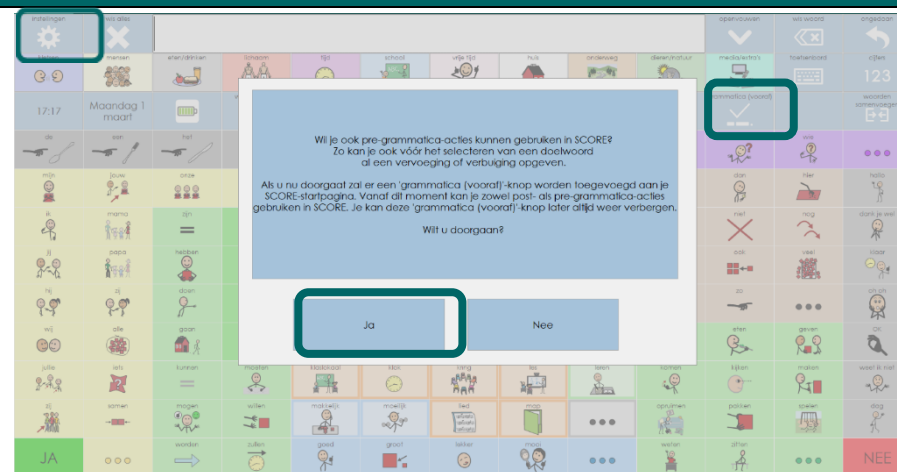


Nieuw

9. Verkleinvormen

- o Reden: in Mind Express 5 kan je zelfstandige naamwoorden in de verkleinvorm (enkelvoud en meervoud) zetten. Bijgevolg werd dit toegevoegd aan de pre- en post-grammatica-acties in SCORE 2.0.
- o Werkwijze:
 - i. Post-grammatica:
 - 1. Selecteer een zelfstandig naamwoord
 - 2. Selecteer de gewenste verkleinvorm in de dynamische keuzelijst
 - ii. Pre-grammatica:
 - 1. Selecteer het vakje "grammatica (vooraf)"
 - 2. Selecteer de drie zwarte stippen "..."
 - 3. Selecteer de gewenste verkleinvorm in de dynamische keuzelijst
 - 4. Selecteer een zelfstandig naamwoord

Meer info

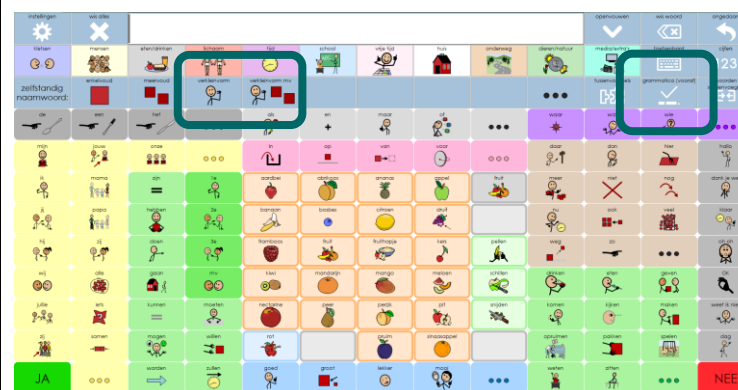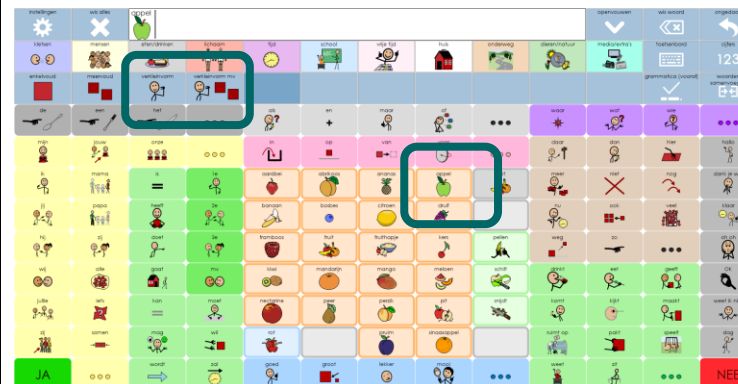


Nieuw

10. Tussenvoegsels: nieuwe visualisatie, locatie en stijl

- o Reden:
 - i. Door de uitbreiding van de grammaticale mogelijkheden, werd de positie en visualisatie van verschillende functietoetsen opnieuw geëvalueerd.
 - ii. De tussenvoegsels zelf hebben een groter lettertype gekregen, zodat ze eenvoudiger te lezen zijn.
- o Werkwijze:
 - i. Selecteer het vakje "grammatica (vooraf)"
 - ii. Selecteer het vakje "tussenvoegsels"

Meer info

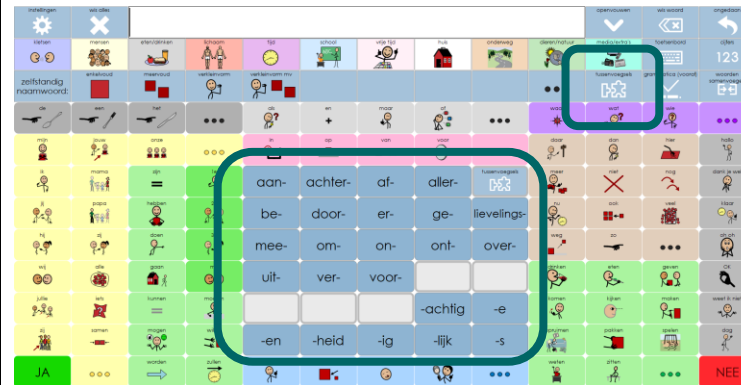


Nieuw

11. Speciale tekens

- o Werkwijze:
 - i. Ga naar "toetsenbord"
 - ii. Ga vervolgens naar "letters/speciale tekens"
 - iii. Selecteer het vakje "meer"
 - iv. Selecteer de gewenste letter of het gewenste teken

Meer info

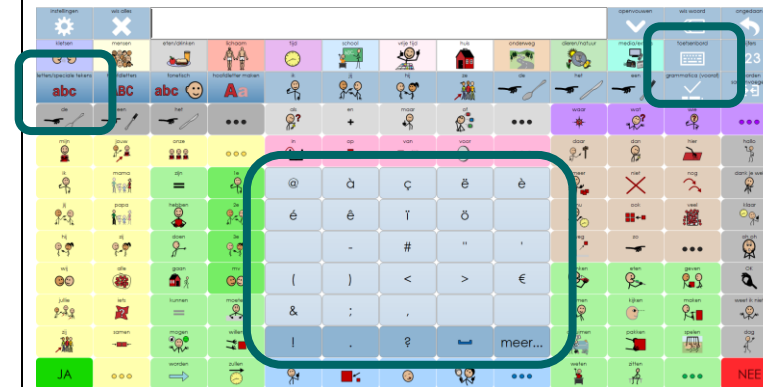

Nieuw

12. Hoofdletter maken

- o Werkwijze:
 - i. Ga naar "toetsenbord"
 - ii. Ga vervolgens naar "hoofdletter maken"
 - iii. Selecteer de gewenste hoofdletter
 - iv. SCORE keert automatisch terug naar de reguliere letterkaart ("letters/speciale tekens")
Deze functionaliteit werkt dus een beetje zoals een Caps-toets.

Meer info




Nieuw

13. ME5-zoekfunctie geïntegreerd in SCORE 2.0.

- o Reden:
 - i. Tijdens het modelleren eenvoudig een doelwoord kunnen opzoeken.
 - ii. Wil je SCORE personaliseren? Ga eerst even na of het woord nog niet in SCORE staat.
- o Werkwijze:
 - i. Typ het gezochte woord in de notitie
 - 1. Met een aangesloten toetsenbord
 - 2. Of met het onscreen toetsenbord van je Windows-toestel
 - 3. Of met een letterkaart in SCORE
 - ii. Ga naar "instellingen"
 - iii. Selecteer "woord zoeken"
 - iv. Het pop-upvenster "Zoeken" verschijnt. Als je getypte woord in SCORE aanwezig is, zie je hier het resultaat van je zoekopdracht.
 - v. Klik op het zoekresultaat. Mind Express leidt je via een gekleurd pad naar de locatie van het woord.

Meer info

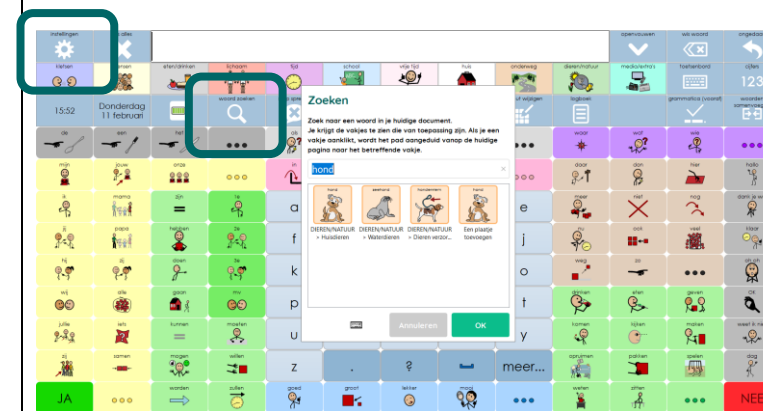

Nieuw

14. Alternatieve woordvoorspelling met symbolen

- o Reden:
 - i. In Mind Express 5 heb je niet alleen een reguliere woordvoorspeller ter beschikking, maar ook een alternatieve woordvoorspeller. Zo krijg je spellingcorrecties te zien, wanneer je al één of meerdere spellingfouten typte in de aanzet van je woord.
 - ii. Om geletterdheid maximaal te ondersteunen en stimuleren in SCORE, werden daarom alvast 2 alternatieve woordvoorspellingsvakjes toegevoegd
- o Werkwijze:
 - i. Ga naar "toetsenbord"
 - ii. Kies je gewenste toetsenbord ("letters/speciale tekens" of "hoofdletters" of "fonetisch" of "hoofdletter maken")
 - iii. Vorm je woord met het toetsenbord
 - iv. De alternatieve woordvoorspelling zal correcties suggereren, wanneer je een spellingfout maakt.

Meer info




Nieuw

15. Ruimte voor eigen foto's en familieleden

- o Reden:
 - i. De subcategorie "gezin/familie" wordt vaak gepersonaliseerd.
 - ii. In SCORE 2.0. heb je nu alvast twee pagina's om de nodige ruimte te bieden.
 - iii. Op beide pagina's zijn er vakjes voorzien om eigen foto's toe te voegen.
- o Werkwijze:
 - i. Ga naar "mensen"
 - ii. Ga vervolgens naar "gezin/familie"
 - iii. In ME5 > Menu > "Bewerken"
 - iv. Dubbelklik op het dynamisch middenblok
 - v. Je wordt naar de achterliggende doelpagina gebracht. Daar kan je de inhoud van de pagina bewerken. Meer info over het bewerken van vakjes, vind je in de handleiding en in onze instructievideo's:
 1. <https://www.jabbla.com/instructievideo/>
 2. <https://www.jabbla.com/fag/handleidingen/>

Meer info

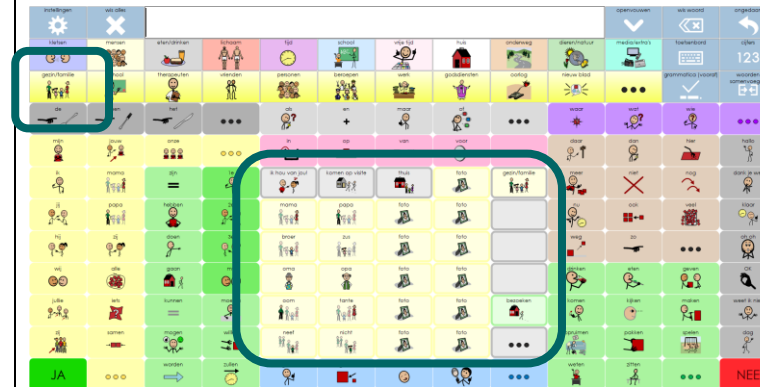


Nieuw

16. Nieuwe radiostations

- o Reden: een aantal radiostations waren niet langer operationeel
- o Beluisteren:
 - i. Ga naar "media/extra's"
 - ii. Ga vervolgens naar "internet radio"
 - iii. Klik op een vakje met een radiostation
 - iv. Wacht een aantal seconden
 - v. De radio begint te spelen


Meer info

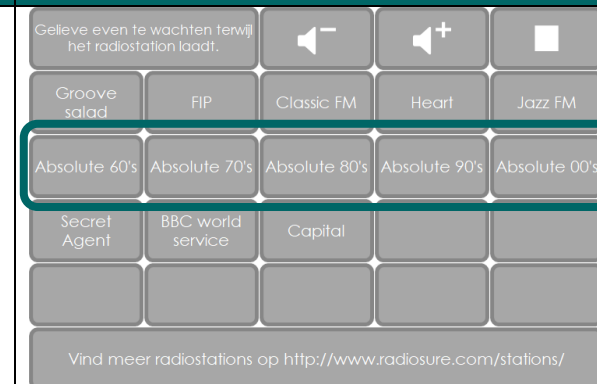

Nieuw

17. Muziek, video's en foto's in dynamische lijsten. Deze bestanden staan niet meer in folders op je computer.
- o Reden: je muziek, video's en foto's worden mee geëxporteerd, alsook mee opgenomen in een eventuele back-up in de cloud.

Meer info

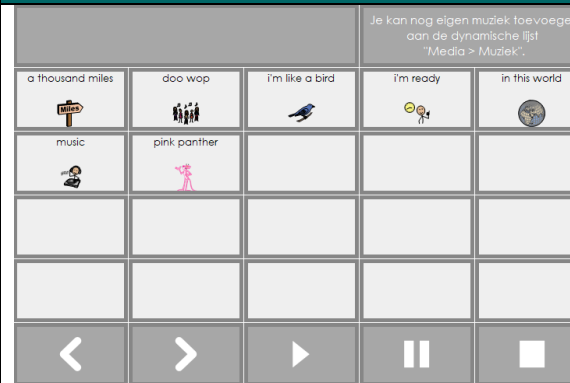

Nieuw

18. De stijlen in SCORE v2 hebben rechte hoeken (geen afgeronde hoeken meer).
- o Reden: visuele rust

Meer info



Nieuw

19. Geluidseffecten in de categorie "dieren/natuur", "verkeer" en "opmerkingen". Beluisteren:

- o *Dieren/natuur*
 - i. Ga naar "dieren/natuur"
 - ii. Ga vervolgens naar "huisdieren" of "boerderijdieren"
 - iii. Klik op een vakje met een icoontje van een luidspreker
- o *Verkeer*
 - i. Ga naar "onderweg"
 - ii. Ga vervolgens naar "verkeer"
 - iii. Klik op een vakje met een icoontje van een luidspreker
- o *Opmerkingen*
 - i. Ga naar "kletsen"
 - ii. Ga vervolgens naar "opmerkingen (via de drie zwarte puntjes)"
 - iii. Klik op een vakje met een icoontje van een luidspreker

Meer info




Nieuw

20. Meerdere fotoboekjes in SCORE v2.

- o In SCORE v 1.76 had je één fotoboekje. In SCORE v2 zijn er alvast 6 kant-en-klare fotoboekjes.
- o Werkwijze om fotoboekjes te raadplegen
 - i. Ga naar "media/extra's"
 - ii. Ga naar "foto's"
 - iii. Klik op een vakje met een figuur. Op die manier word je naar een fotoboekje gebracht.
- o Werkwijze om als begeleider (in "Bewerken") foto's toe te voegen aan de fotoboekjes: wil je eigen foto's toevoegen? Raadpleeg dan dit stappenplanetje*

Meer info

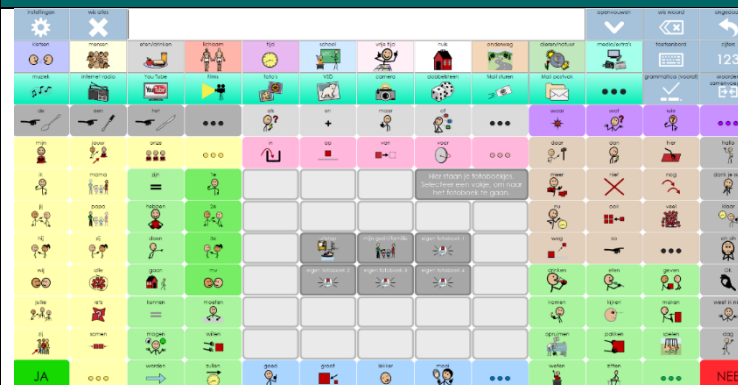


3. Ga naar "Bewerken"



4. Dubbelklik op het dynamisch blok. Zo word je automatisch naar het overzicht met fotoboekjes gebracht.



5. Pas de visualisatie van het fotoboekje aan. Klik hiervoor op het vakje dat je wil bewerken of invullen.
Tip: kijk hoe er te werk gegaan is bij de voorbeeldboekjes. Deze werkwijze kan je kopiëren voor je eigen, nieuwe fotoboekje. Vul dit vakje met:
- Een figuur om je fotoboekje te visualiseren
 - Een label, als benaming van het fotoboekje
 - Controleer of de correcte actie "Dynamische inhoud" > "Pagina weergeven" opgegeven staat. Ga ook na of de juiste pagina in het dynamisch blok getoond wordt.

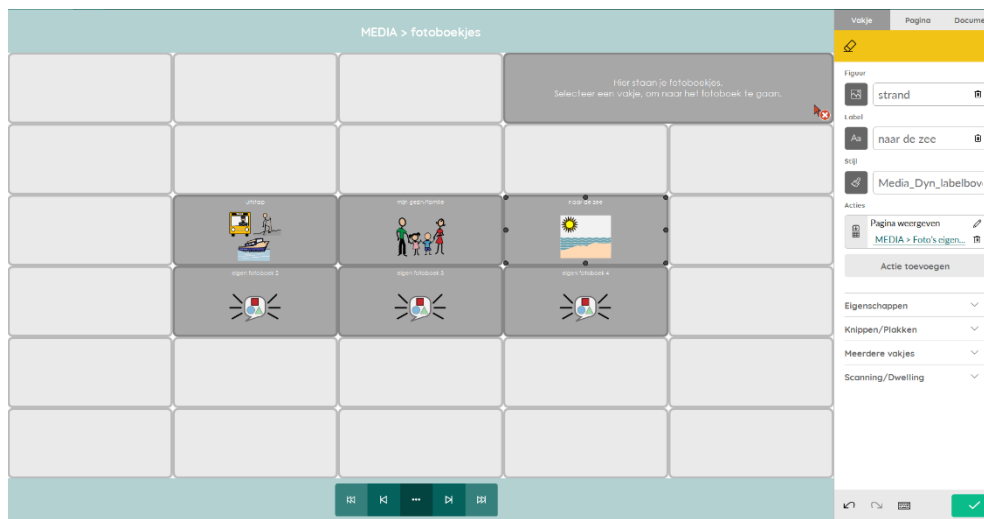


6. Ga terug naar pagina 1 en stop het bewerken.



- Ga terug naar "media/extra's" > "foto's"
- Klik op het fotoboekje met de nieuwe visualisatie. Je wordt automatisch naar dit fotoboekje gebracht.

9. Ga terug naar "Bewerken". Dubbelklik op het groot vak, waarin je foto's wil tonen. Je wordt automatisch naar de dynamische lijst gebracht, waar je de foto's kan toevoegen.

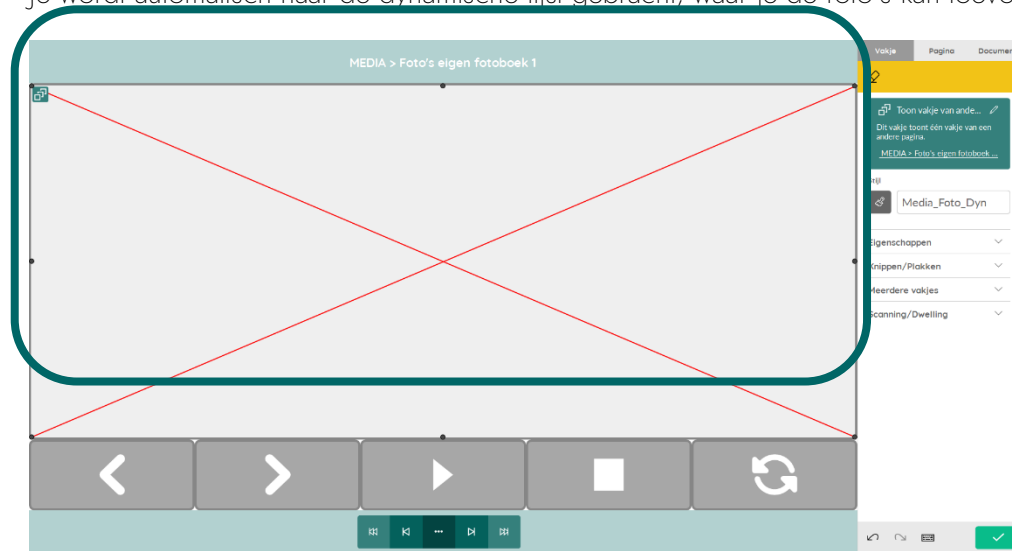

10. Vul deze vakjes met:

- d. Een foto als figuur.
 - i. Ga naar de locatie op je computer, waar je gewenste foto's opgeslagen staan.

Figuur kiezen




- ii. Tip: je kan ook rechtstreeks vanuit het "Figuur kiezen"-venster een foto nemen, zodat deze meteen in het geselecteerde vakje wordt geplaatst.


Figuur kiezen



- e. Indien gewenst: een label
f. Indien gewenst: een actie "Tekst", als er een tekst uitgesproken moet worden, wanneer een foto aangeklikt wordt.

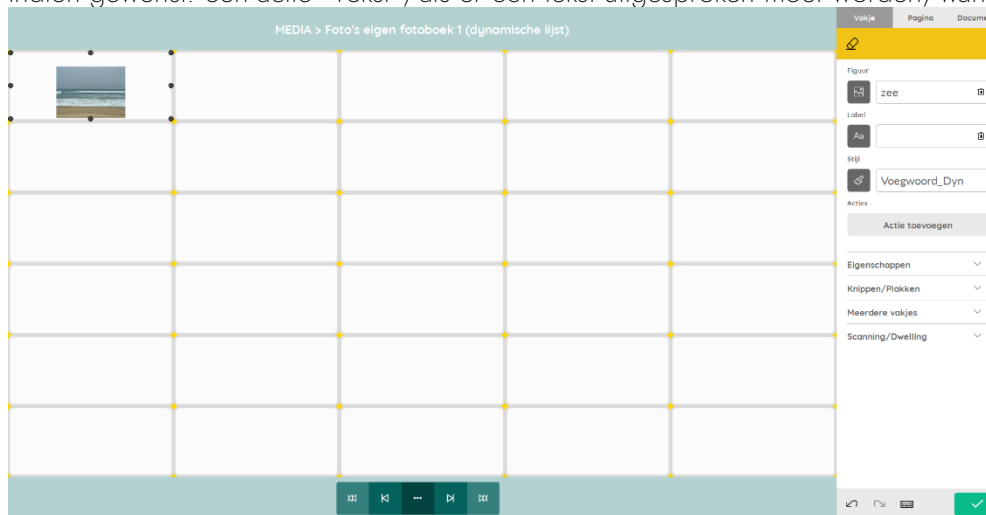

11. Wijzig de paginatitel

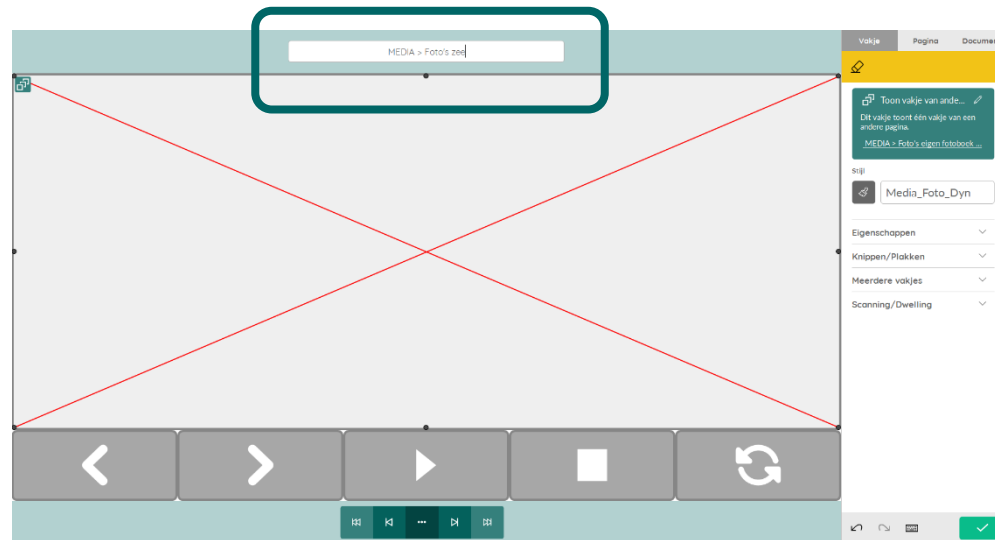

12. Ga terug naar pagina 1 en stop het bewerken.




Nieuw

21. Mogelijkheid om camera-foto's toe te voegen aan een fotoboekje

o Werkwijze

- i. Maak een foto via "media/extra's" > camera.
- ii. Ga vervolgens naar de camera-foto's.
Dit kan ook via:
 1. naar "media/extra's"
 2. Ga naar "foto's"
 3. Ga naar "naar camera-foto's"
- iii. Blader naar de camera-foto die je wil toevoegen aan een fotoboekje.
- iv. Gewenste foto gevonden? Klik dan op "toevoegen aan fotoboek"
- v. Klik op het fotoboekje, waar je de camera-foto aan wil toevoegen.
- vi. Resultaat bekijken? Blader in het fotoboekje totdat je de foto vond.
- vii. Wil je de foto terug wissen uit het fotoboek? Dit kan je enkel doen als begeleider via "Bewerken". Ga naar de dynamische lijst van het fotoboekje en verwijder het vakje.

Meer info

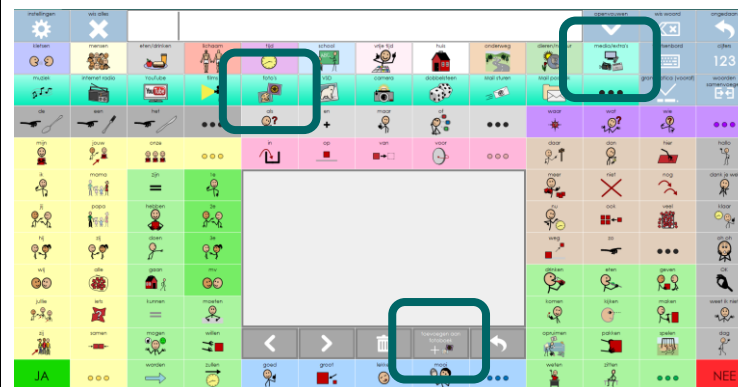


Nieuw

22. Uitspraakwoordenboek

- o Net zoals bij Aloha, kan je ook meteen een uitspraakwoordenboek toevoegen aan je SCORE v2
- o Reden:
Er is een uitspraakwoordenboek ontwikkeld door ALOHA in Mind Express 5. Dit uitspraakwoordenboek is oorspronkelijk bedoeld voor de kinderstemmen van Acapela.

Meer info

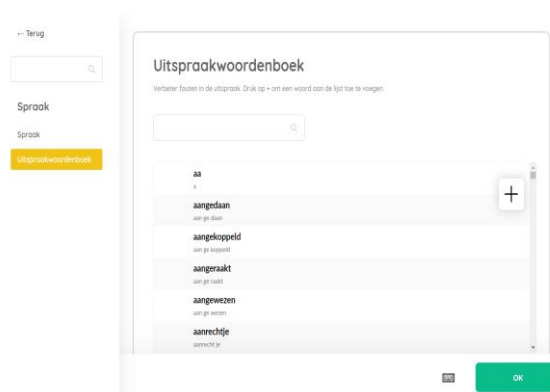

Nieuw

23. Weekplanner

- o Je kan met je SCORE-woordenschat een overzicht van je weekactiviteiten creëren.
- o Werkwijze:
 - Zet de gewenste activiteit in je notitiebalk.
 - Ga naar "tijd"
 - Ga naar "weekplanner" (via de drie zwarte puntjes)
 - Selecteer het vakje "Boodschap opslaan"
 - Selecteer vervolgens het vakje, waarin je de boodschap wil opslaan.
 - Wil je de activiteit terug wissen uit de weekplanner?
Wis je notitiebalk en sla deze lege notitie op in het vakje dat je wil wissen. Je gaat het vakje dus overschrijven.

Meer info

